

IHR WEG ZU EINFACH SCHÖNEREN NARBEN:

- ZWEIMAL TÄGLICH: MORGENS UND ABENDS
- MINDESTENS ZWEI MONATE LANG

- Diskrete Narbenbehandlung transparent , geruchlos & überschminkbar
- Elastisch und dehnbar: Für beanspruchte Körperstellen wie z. B. Schulter, Knie, Gelenke, Gesicht und Dekolleté
- Ergiebig und sparsam in der Anwendung
- Für Kinder geeignet
- Trocknet schnell matt ab und klebt nicht

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.dermatix.net

HINWEIS

DERMATIX® Ultra: Inhaltsstoffe: Cyclische und polymere Siloxane, Vitamin-C-Ester. **AW:** Vorbeugung u. Behandlung von hypertrophen Narben u. Keloiden nach Abschluss der Wundheilung (d. h. b. intakter/geschlossener Hautoberfl.). **Hinweise:** Nicht anwenden auf offenen Wunden, Schleimhäuten, in Augennähe, auf anderweitig behandelten Hautflächen ohne ärztlichen Rat. Hinterlässt Flecken auf d. Kleidung, wenn nicht vollständig getrocknet. Bei Auftritt v. Rötungen, Schmerzen o. Hautirritationen, Therapie absetzen und Arzt/Apotheker um Rat fragen. Nur äußerlich anwenden; für Kinder unzugängl. aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. **Stand:** August 2009. **MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg**

Ein Service von
MEDA
www.dermatix.net



- **Dermatix® Ultra Gel 15 g** | PZN 60 90 286
- **Dermatix® Ultra Gel 60 g** | PZN 60 90 292

Praxisstempel

Dermatix® Ultra erhalten Sie
rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

Dermatix®
Einfach schönere Narben **ULTRA**

9735-0015

Dermatix®
Einfach schönere Narben **ULTRA**



Die unsichtbare Therapie und Prophylaxe: sanft und wirksam

Dermatix®
Einfach schönere Narben **ULTRA**

NICHT SELTEN KÖNNEN SICH DURCH UNFÄLLE ODER OPERATIONEN UNSCHÖNE NARBEN BILDEN.

Viele Menschen sind mit dem Aussehen ihrer Narbe unzufrieden. Die Wenigsten jedoch wissen, dass die Ausprägung einer Narbe zwei Jahre und länger benötigt!

→ Diese Zeit können Sie nutzen, um die Narbenbildung positiv zu beeinflussen – besonders effektiv in den ersten Monaten.

MINIMIEREN SIE **JETZT** DAS RISIKO EINER GESTÖRTEN NARBENBILDUNG!

Beugen Sie einer auffälligen Narbenbildung vor – von Anfang an!

Störende Narben sind:

- 1 oft erhaben
- 2 rot
- 3 sie jucken oder schmerzen
- 4 sie beeinträchtigen die Flexibilität unserer Haut und Gelenke

Eine intensive Pflege Ihrer Narbe ist notwendig. Durch die regelmäßige und tägliche Pflege Ihrer Narbe mit **Dermatix® Ultra** haben Sie die Möglichkeit das Erscheinungsbild Ihrer Narbe deutlich zu verbessern - die optimale Narbenpflege von Anfang an.

Silikon-Gel und Silikon-Gel-Folien werden zur Prophylaxe und Behandlung empfohlen, um das Risiko einer abnormen Narbenbildung zu vermindern und das bestmögliche kosmetische Ergebnis zu erzielen.



FRAGEN, DIE SIE SICHERLICH BESCHÄFTIGEN.

Meine Narbe schmerzt und juckt?

Mit **Dermatix® Ultra**:

- wird der Juckreiz von Narben vermindert,
- werden Schmerzen & Spannungsgefühle reduziert,
- verblassen rote oder dunkel gefärbte Narben,
- werden Narben flacher, weicher und glatter.

Sie suchen eine diskrete Narbenbehandlung?

Dermatix® Ultra ist ein transparentes, geruchloses Gel. Sie können es problemlos auch an exponierten Körperteilen wie Gesicht und Dekolleté anwenden.

Sie möchten Ihre Narbe kaschieren?

Dermatix® Ultra ist überschminkbar. Make-up kann problemlos aufgetragen werden, sobald das Gel getrocknet ist.

Ihre Narbe ist an einer Körperstelle, die von Kleidung bedeckt wird?

Sie können **Dermatix® Ultra** auch unter Kleidung verwenden. Einfach nach dem Auftragen des Gels 3-5 Minuten warten - sobald das Gel getrocknet ist, kann Kleidung übergezogen werden..

Sie möchten **Dermatix® Ultra** auch für Ihre Kinder verwenden?

Aufgrund der guten Verträglichkeit ist **Dermatix® Ultra** auch zur Behandlung von Kindern geeignet.

DERMATIX® ULTRA, EINFACH IN DER ANWENDUNG!

Eine regelmäßige Anwendung ist Ihr Schlüssel zum Erfolg. **Dermatix® Ultra** wird zweimal täglich angewendet für mindestens zwei Monate – am besten morgens und abends:

SCHRITT 1

Reinigen Sie die Narbe mit Wasser und einer milden Seife. Trocknen Sie die Narbe anschließend gut ab.



SCHRITT 2

Tragen Sie eine sehr dünne Schicht **Dermatix® Ultra Gel** auf Ihre Narbe auf, sobald die Wunde geschlossen ist – **bitte nicht einmassieren.**



SCHRITT 3

Lassen Sie **Dermatix® Ultra** 3-5 Minuten an der Luft trocknen. Es bildet sich ein hauchdünner, unsichtbarer Film. Sollte das Gel in dieser Zeit nicht getrocknet sein, haben Sie etwas zu viel Gel aufgetragen. Entfernen Sie das überschüssige Gel mit einem fusselfreien Tuch und lassen Sie **Dermatix® Ultra** weiter trocknen.



www.dermatix.net